

Troop Elevation Pillow: Pflege- und Gebrauchsanweisung

Beschreibung

Das Troop Elevation Pillow ist ein Positionierungskissen aus Schaumstoff, das speziell für eine verbesserte Atemwegssicherung und Sicherheit bei der Pflege adipöser und krankhaft adipöser Patienten entwickelt wurde. Dieses System hilft dabei, Patienten schnell in die erhöhte Laryngoskopie-Lagerung (H.E.L.P.-Position) zu bringen, bei der die Atemwegsachsen ausgerichtet werden, sodass der übergewichtige Patient zum Zeitpunkt der Sauerstoffgabe oder spontan besser atmen kann, während er sich unter regionaler / lokaler Betäubung befindet.

Verwendung

Bestimmte Anwender: Geschulte medizinische Dienstleister im Bereich des Atemwegsmanagements.

1) Platzieren Sie das Troop Elevation Pillow (TEP) an den oberen Rand des OP-Tisches und bedecken Sie das TEP mit einem undurchlässigen **Einmal-Schutzbezug** (dieser Bezug macht das System angenehmer für den Patienten und schützt den Basispolster vor Verunreinigungen. Der Bezug dient als **Infektionsschutz**.) **Positionieren Sie ein Standard-Intubationskissen oder ringförmiges Positionierungskissen auf den oberen flachen Teil des TEP.** Das Kopfpolster sollte mit einem OP-Tuch oder einer OP-Schutzhaube abgedeckt werden. Ein Tuch quer *unter* das Elevation Pillow legen. Wenn der Patient nach der Intubation auf dem OP-Tisch bewegt werden muss (z.B. in die Lithotomie-Position), kann man mit Hilfe des Tuches den Patienten zusammen mit dem Troop Elevation Pillow umlagern und der Patient bleibt in der gleichen erhöhten Kopfposition für die Laryngoskopie (H.E.L.P. - *Head Elevated Laryngoscopy Position*).

2) Den OP-Tisch ca. 5-10 Grad nach hinten senken (der Patient kann dann von der Transportliege auf eine „ebenen Fläche“ auf den OP-Tisch transferiert werden.)

3) Die Schultern des Patienten sollten auf der oberen Welle des **Troop Elevation Pillow** aufliegen. Der Kopf des Patienten liegt auf dem Standard-Intubationskissen am oberen Rand des Troop Elevation Pillow auf.

4) Wenn der Patient am OP-Tisch gelagert ist und am **Troop Elevation Pillow und dem Standard-Intubationskissen** aufliegt, kann der OP-Tisch nach Bedarf wieder etwa 5-10 Grad hoch gestellt werden.

5) Die Armausleger mit zusätzlicher Schaumpolsterung bzw. gefalteten Handtüchern anpassen oder die **Armpolster (mit Hülle aus Vinyl) (separat erhältlich) positionieren.**

6) **Ein Standard-Lagerungspolster unter die Knie des Patienten legen.**


VORSICHT: Wenn eine steile Kopftieflagerung für die Operation geplant ist, wird empfohlen, das Basispolster nach der Intubation **zu entfernen.**



Anweisung zur Anwendung des Troop Elevation Pillow

(Entwickelt zum Einsatz mit einem Standard-Intubationskissen)


(Legen Sie ein Tuch quer unter das Elevation Pillow (TEP); bei Bedarf erleichtert dieses Tuch die Umlagerung des Patienten in einem Schritt gemeinsam mit dem TEP)

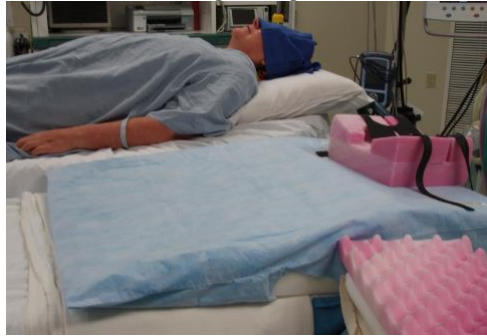

(Bringen Sie den OP-Tisch in eine leicht nach hinten abgesenkte Position. Richten Sie den abgesenkten Teil nach der Umlagerung wieder auf, um den Patienten in **die H.E.L.P.-Position** zu bringen)

(Legen Sie ein Standard-Lagerungspolster unter die Knie des Patienten)

Legen Sie einen Einmal-Schutzbezug über das vinylbeschichtete Elevation Pillow

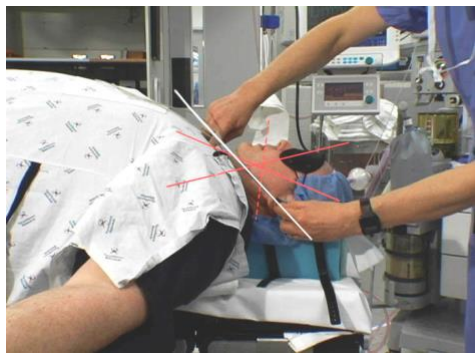

Krankhaft adipöser Patient: wird aus der geraden Rückenlage in die erhöhte Laryngoskopie-Lagerung (H.E.L.P.-Position) gebracht

(Sehen Sie sich das Schulungsvideo auf der Schulungs-Webseite www.troopelevationpillow.com an) Rev. Januar 2019

Pflege

Reinigungsanweisungen:

Wir empfehlen die Reinigungsprodukte **Virex, Fantastik oder Formula 409** für die Produktlinie Troop Elevation Pillow. Sämtliche Lagerungskissen müssen nach jeder Verwendung am Patienten gereinigt werden.

1. Entfernen Sie den chirurgischen Einwegschutz vom Troop Elevation Pillow und entsorgen Sie ihn als klinischen medizinischen Abfall.
2. Tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit großzügig auf die Oberseite, die Seiten und die Unterseite des Elevation Pillow auf und wischen Sie sie mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab. Verwenden Sie ein sauberes, in Wasser getränktes Tuch, um das Reinigungsmittel zu beseitigen. Verwenden Sie dann zum Abschluss ein sauberes Tuch, um alle verbleibenden Rückstände zu entfernen.
3. Positionieren Sie das Troop Elevation Pillow so, dass es vollständig an der Luft trocknen kann.
4. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang für das Kopfpolster, das Troop-Zusatzpolster und die -Armpolster, falls diese ebenfalls gereinigt werden müssen. Entsorgen Sie die Klettbänder – sie sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Eine Wasserstoffperoxid-Reinigungslösung wie Virex kann das Vinyl verfärben oder (im Laufe der Zeit) die Beschaffenheit des Vinyls verändern. Wir empfehlen, unsere Produktlinie nicht in der Waschmaschine zu waschen oder zu trocknen, mit Gas zu sterilisieren oder autoklavieren. Unsere Lagerungskissen sollten niemals in Reinigungslösung getaucht werden, da dies die Integrität des Produkts ernsthaft beeinträchtigen kann.

Lagerung und Handhabung:

Die folgenden Lagerungsbedingungen werden empfohlen, um die Unversehrtheit der Troop Pillow-Produkte zu erhalten, sodass ein Erhärten, Erweichen, Reißen oder eine Veränderung der Oberfläche vermieden werden kann:

Hitze: Die Lagertemperatur sollte vorzugsweise zwischen 4 und 25 Grad liegen. Direkter Kontakt mit Wärmequellen sollte vermieden werden.

Feuchtigkeit: Die relative Luftfeuchtigkeit im Lagerraum sollte zwischen 30% und 70 % liegen. Sehr feuchte oder sehr trockene Bedingungen sollten vermieden werden.

Lichteinstrahlung: Vermeiden Sie es, das Produkt längere Zeit direktem Sonnenlicht auszusetzen. Unsere Produkte sind für den Einsatz in normalen Innenräumen konzipiert.

Nicht mit scharfen Kanten oder Oberflächen in Verbindung bringen, die das Lagerungskissen durchstoßen, zerreißen, schneiden oder einklemmen könnten. Das Lagerungskissen mit Sorgfalt handhaben, um Schäden an ihm zu vermeiden.

Entsorgungsverfahren:

Die Produktlinie Troop Elevation Pillow enthält keine medizinischen Substanzen. Die Vinyl-Lagerungskissen sollten als allgemeiner medizinischer Abfall entsorgt werden. Die OP-Abdeckungen sollten als klinischer Abfall entsorgt werden und können entweder hitzebehandelt oder verbrannt werden.

Aufbau

Verwendete Materialien sind eine Vinyloberfläche mit Polyestersubstrat und Polyurethanschaum. Die Klettbänder sind aus Polypropylen mit Haken und Nylonschlaufe.

Konformität mit den Brandschutzbestimmungen:

Alle Materialien erfüllen die Brandschutzbestimmungen: Das Technical Bulletin des kalifornischen Ministeriums Abteilung für Verbraucherangelegenheiten Nr. 117-2013 und TB129. Dies beinhaltet sämtliche Hüllen und Schaumfüllungen. Alle Materialien entsprechen den Brandschutzanforderungen des Boston Fire Code.

Die Vinylhülle verfügt über einen antimikrobiellen Schutz und ist schimmelresistent. Alle Materialien sind antistatisch, latex- und phthalatfrei.

Garantie:

Es wird garantiert, dass das Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und über einen Zeitraum von zwei Jahren einsatzfähig sind, mit Ausnahme von Missbrauch, Fahrlässigkeit, falscher Benutzung oder Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Pflege- und Nutzungsrichtlinien. Zum Schutz des Troop Elevation Pillow und Zusatzpolsters muss bei jeder Verwendung eine OP-Abdeckung verwendet werden, um die Garantie aufrecht zu erhalten.

Bone Foam, Inc. behält sich das Recht vor, zu entscheiden, ob ein Polster reparabel ist und ob es missbräuchlich, fahrlässig oder falsch benutzt wurde. Der Kunde übernimmt die vollen Kosten für die Rücksendung der Ware. Für alle Garantieforderungen ist ein Kaufnachweis erforderlich. Alle spezifischen Anfragen zur Garantie und zu gravierenden Beanstandungen sind an Bone Foam, Inc. in Corcoran, Minnesota, zu richten: +1-763-559-1830 und an die zuständige Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender seine Niederlassung hat.

Vorsichts- und Warnhinweise sowie Vorsichtsmaßnahmen: Um Verletzungen zu vermeiden, sollten alle Teile des Troop Elevation Pillow (TEP) sicher auf dem verwendeten Krankenhausbett abgelegt werden. Der Benutzer wird angewiesen, die vorgeformte OP-Abdeckung oder den undurchlässigen OP-Schutz über dem TEP zu platzieren. Wickeln Sie den TEP während des Gebrauchs des Patienten niemals in Plastik.



Bone Foam, Inc.
20175 County Road 50, Corcoran, MN
55340 USA
Phone: 763-559-1830 Fax: 763-559-1822
www.troopelevationpillow.com
www.bonefoam.com



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen
Fax: +49-511-3908 9539
Telefon: +49-511-3908 9530

Webseite für den Unterricht:
www.troopelevationpillow.com

Hergestellt in den USA



" Nicht mit Naturgummilatex hergestellt"

Symbole, die auf der Etikettierung erscheinen:

Symbol	Symbol Ref.-Nr.	Bezeichnung des Symbols	Symbolbeschreibung
	5.1.1	Hersteller	Bezeichnet den Hersteller des Medizinproduktes, wie in der Richtlinie EU MDR 2017/745 angegeben.
	5.1.2	Zugelassener Vertreter bei der Europäische Gemeinschaft	Bezeichnet den bevollmächtigten Vertreter bei der Europäischen Gemeinschaft.
	5.1.3	Herstellungsdatum	Gibt das Herstellungsdatum des Medizinprodukts an.
	5.1.5	Chargencode	Bezeichnet den Chargencode des Herstellers, so dass die Charge oder das Volumen ermittelt werden kann.
	5.1.6	Katalog-Nummer	Gibt die Katalognummer des Herstellers an, so dass das Medizinprodukt ermittelt werden kann.
	5.2.7	Nicht sterilisiert	Kennzeichnet ein Medizinprodukt, welches keinem Sterilisationsverfahren unterliegt.
	5.3.2	Vor dem Sonnenlicht fernhalten	Stellt ein medizinisches Gerät vor, welches einen Lichtquellenschutz benötigt.
	5.3.7	Temperaturgrenzwert	Gibt die Temperaturgrenzwerte an, die eingehalten werden müssen, damit das medizinische Gerät sicher betrieben werden kann.
	5.3.8	Feuchtigkeitsbeschränkung	Gibt den Feuchtigkeitsgehalt an, in dem das medizinische Gerät sicher gelagert werden kann.
	5.4.3	Beachten Sie die Gebrauchsanweisung bzw. Beachten Sie die elektronische Gebrauchsanweisung	Verweist auf die Aufforderung an den Benutzer, die Gebrauchsanweisung zu beachten.
	5.7.7	Medizinprodukt	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein <i>Medizinprodukt</i> handelt