

Troop Elevation Pillow: Οδηγίες χρήσης και φροντίδας

Περιγραφή

Το Troop Elevation Pillow είναι ένα σύστημα τοποθέτησης αφρού, ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση της διαχείρισης των αεραγωγών και της ασφάλειας, όταν οι πάροχοι αναισθησίας φροντίζουν παχύσαρκους και εξαιρετικά παχύσαρκους ασθενείς. Αυτό το σύστημα βοηθάει στην επίτευξη της θέσης της ανυψωμένης κεφαλής για λαρυγγοσκόπηση (HELP), η οποία επιτρέπει στους άξονες των αεραγωγών να ευθυγραμμίζονται, έτσι ώστε ο παχύσαρκος ασθενής να μπορεί να αναπνέει ευκολότερα κατά τη διάρκεια της προ-οξυγόνωσης ή αυθόρμητα στην περιφερειακή/τοπική ή τεχνική αποκλεισμού.

Χρήση

Προορίζεται για τους εξής χρήστες: Εκπαιδευμένους ιατρικούς παρόχους διαχείρισης αναπνευστικής οδού.

1) Τοποθετήστε το Troop Elevation Pillow (TEP) στην κεφαλή του χειρουργικού τραπεζιού και καλύψτε το TEP με ένα **αδιαπέραστο χειρουργικό ή προστατευτικό κάλυμμα**, (αυτό το κάλυμμα παρέχει πρόσθετη άνεση για τον ασθενή και βοηθά να διατηρηθεί το EP καθαρό. Το κάλυμμα είναι **λειτουργία ελέγχου της μόλυνσης**.) **Τοποθετήστε ένα τυπικό μαξιλάρι διασωλήνωσης ή ένα κουλούρι αφρού στο άνω οροπέδιο/επάνω τμήμα του TEP.** Η βάση της κεφαλής πρέπει να καλύπτεται με χειρουργική πετσέτα ή ιατρικό κάλυμμα κεφαλής. Τοποθετήστε ένα φύλλο «διαγώνια» κάτω από το Μαξιλάρι Ανύψωσης. Εάν μετά τη διασωλήνωση ο ασθενής πρέπει να μετακινηθεί προς τα κάτω στο χειρουργικό τραπέζι (για παράδειγμα στη θέση λιθοτομής), σηκώνοντας με το φύλλο, το Troop Elevation Pillow & ο ασθενής μπορεί να μετακινηθεί ως μία μονάδα και ο ασθενής παραμένει στην ίδια θέση λαρυγγοσκοπίας με ανυψωμένη κεφαλή (H.E.L.P.).

2) Γυρίστε το χειρουργικό τραπέζι σε γωνία 5~10 μοίρες 'προς τα κάτω'
(Ο ασθενής μπορεί στη συνέχεια να μεταφερθεί από το φορείο στο χειρουργικό τραπέζι σε "οριζόντια θέση".)

3) Οι ώμοι του ασθενούς πρέπει να στηρίζονται στην ανώτερη καμπύλη του **Troop Elevation Pillow.** Το κεφάλι του ασθενούς θα πρέπει να στηρίζεται στο τυπικό μαξιλάρι διασωλήνωσης, στο ανώτερο άκρο του Troop Elevation Pillow.

4) Όταν ο ασθενής είναι στο χειρουργικό τραπέζι και στηρίζεται στο **Troop Elevation Pillow & στο τυπικό μαξιλάρι διασωλήνωσης** δώστε στο τραπέζι κλίση 5-10 μοίρες «προς τα πάνω» ανάλογα με την περίπτωση.

5) 'Συναρμολογήστε' τις βάσεις βραχίονα με αφρό και / ή διπλωμένες κουβέρτες ή τοποθετήστε τους **Ανυψωμένους (με κάλυμμα βινυλίου) Πάγκους για τα μπράτσα (πωλούνται ξεχωριστά).**

6) **Τοποθετήστε ένα 'κανονικό' μαξιλάρι νοσοκομείου κάτω από τα γόνατα του ασθενούς.**


ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν έχει προγραμματιστεί επέμβαση με το κεφάλι να έχει απότομη κλίση προς τα κάτω, προτείνεται να **αφαιρεθεί** το Μαξιλάρι Ανύψωσης μετά τη διασωλήνωση. Αντίστοιχα, άλλες χρήσεις διαχείρισης μη-αεραγωγών του TEP ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετες ρυθμίσεις του χειρουργικού τραπεζιού.



Το Troop Elevation Pillow / Οδηγίες ρύθμισης

(Σχεδιασμένο για χρήση με ένα τυπικό μαξιλάρι διασωλήνωσης)


(Τοποθετήστε ένα «διαγώνιο φύλλο» κάτω από το μαξιλάρι ανύψωσης (TEP), αν χρειάζεται. Αυτό βοηθάει στη μετακίνηση του ασθενούς ως μία “μονάδα” με το TEP)

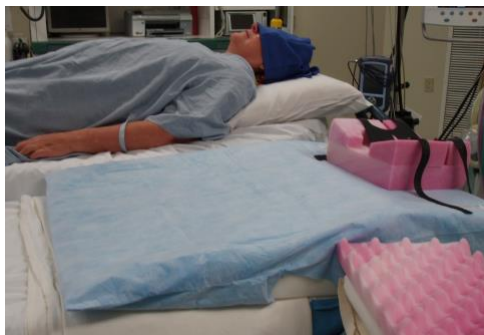

(Τοποθετήστε το χειρουργικό τραπέζι O.R. στη θέση «ελαφριά προς τα κάτω»... διευκολύνει τη μεταφορά του ασθενούς, μετά τη μεταφορά ανυψώστε από πίσω για να επιτύχετε τη θέση **H.E.L.P.**)

(Τοποθετήστε ένα ‘κανονικό’ μαξιλάρι νοσοκομείου κάτω από τα γόνατα του ασθενούς)

Χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό χειρουργικό κάλυμμα πάνω από το μαξιλάρι ανύψωσης βινυλίου.

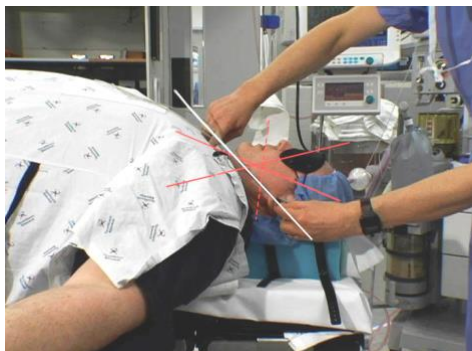

Εξαιρετικά παχύσαρκος ασθενής: από πλήρως ύπτια έως τη θέση ανυψωμένης κεφαλής θέσης λαρυγγοσκόπησης... (H.E.L.P.)

(Παρακολουθήστε το βίντεο οδηγιών στον εκπαιδευτικό ιστότοπο...www.troopelevationpillow.com) Αναθ. Ιανουάριος, 2019

Φροντίδα

Οδηγίες καθαρισμού:

Τα **Virex, Fantastik ή Formula 409** είναι τα προτεινόμενα καθαριστικά για τη σειρά προϊόντων Troop Elevation Pillow. Κάθε συσκευή ρύθμισης θέσης πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση ασθενούς.

1. Αφαιρέστε το χειρουργικό προστατευτικό κάλυμμα μίας χρήσης από το Troop Elevation Pillow και απορρίψτε το ως ιατρικά απόβλητα κλινικής.
2. Χρησιμοποιήστε αρκετό υγρό καθαρισμού στην κορυφή, τις πλευρές και την κάτω πλευρά του μαξιλαριού ανύψωσης και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό ύφασμα βρεγμένο με νερό για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε διάλυμα καθαρισμού. Τέλος, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.
3. Τοποθετήστε το Troop Elevation Pillow ώστε να μπορεί να στεγνώσει ελεύθερα από τον αέρα.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού για τα καλύμματα κεφαλής, την προσθήκη Troop και τις βάσεις για τα μπράτσα εάν έχουν χρησιμοποιηθεί.

Το διάλυμα καθαρισμού υπεροξειδίου του υδρογόνου, όπως το Virex, μπορεί να αποχρωματίσει το βινύλιο ή (με την πάροδο του χρόνου) να αλλάξει την «αίσθηση» του βινυλίου. Δεν συνιστάται η σειρά προϊόντων μας να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων, να στεγνώνει με μηχανή, να αποστειρώνεται με αέριο ή σε αυτόκαυστο. Οι ρυθμιστές θέσης δεν πρέπει ποτέ να εμποτίζονται σε διάλυμα καθαρισμού, επειδή μπορεί να επηρεάσουν την ακεραιότητα του προϊόντος.

Αποθήκευση και χειρισμός:

Συνιστώνται οι ακόλουθες συνθήκες αποθήκευσης, για να διατηρηθεί η ακεραιότητα των προϊόντων Troop Pillow έτσι ώστε να αποφευχθεί σκλήρυνση, μαλάκωμα, ρωγμή ή άλλη υποβάθμιση της επιφάνειας:

Θερμότητα: Η θερμοκρασία αποθήκευσης θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι μεταξύ 4C και 25C. Πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή με πηγές θερμότητας.

Υγρασία: Η σχετική υγρασία στην αποθήκη πρέπει να είναι κάτω μεταξύ 30 και 70%. Πρέπει να αποφεύγονται πολύ υγρές ή πολύ ξηρές συνθήκες.

Φως: Είναι καλύτερο να αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως για μεγάλες χρονικές περιόδους. Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα για χρήση σε κανονικό περιβάλλον εσωτερικού χώρου.

Μην έρχεστε σε επαφή με αιχμηρά άκρα ή με οποιαδήποτε επιφάνεια που θα μπορούσε να προκαλέσει διάρρηξη, σχίσμα, κοπή ή τσίμπημα του ρυθμιστή θέσης. Χειριστείτε προσεκτικά τους ρυθμιστές θέσης για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.

Διαδικασίες απόρριψης:

Η σειρά προϊόντων Troop Elevation Pillow δεν αποτελείται από καμία φαρμακευτική ουσία. Οι ρυθμιστές θέσης βινυλίου πρέπει να απορρίπτονται ως γενικά ιατρικά απόβλητα. Τα προστατευτικά χειρουργικά καλύμματα πρέπει να απορρίπτονται ως κλινικά απόβλητα και μπορούν είτε να υποβληθούν σε θερμική επεξεργασία ή να αποτεφρωθούν.

Κατασκευή

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι μία επιφάνεια βινυλίου, με υπόστρωμα πολυεστέρα και αφρό πολυουρεθάνης.

Συμμόρφωση με τον πυροσβεστικό κώδικα:

Όλα τα υλικά συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του πυροσβεστικού κώδικα: το Τεχνικό Δελτίο του Τμήματος

Προστασίας Καταναλωτών της Πολιτείας της Καλιφόρνια # 117-2013 και TB129. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα καλύμματα και τα πληρωτικά αφρού. Όλα τα υλικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ευφλεκτότητας του Πυροσβεστικού Κώδικα της Βοστώνης.

Το κάλυμμα βινυλίου έχει αντιμικροβιακή προστασία και είναι ανθεκτικό στη μούχλα. Όλα τα υλικά είναι αντιστατικά, χωρίς λατέξ και χωρίς φθαλικό άλας.

Εγγύηση:

Με την εγγύηση ότι δεν θα έχει ελαττώματα υλικών ή κατασκευής, κατά τη στιγμή της αγοράς και με δικαίωμα επισκευής για διάστημα δύο ετών, εξαιρουμένης της κακής χρήσης, της αμέλειας, της κατάχρησης ή της μη τήρησης των οδηγιών περί φροντίδας και χρήσης που παρέχονται στο παρόν. Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα προστατευτικό χειρουργικό κάλυμμα μίας χρήσης για να καλύπτει το Troop Elevation Pillow και την προσθήκη για προστασία με κάθε χρήση.

Bone Foam, Inc. διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει εάν ένα επίθεμα μπορεί να επισκευαστεί και αν έχει υποστεί κατάχρηση, αμέλεια ή λάθος χρήση. Ο πελάτης αποδέχεται το πλήρες κόστος των τελών αποστολής επιστροφής. Για όλα τα αιτήματα εγγύησης απαιτείται απόδειξη αγοράς. Όλες οι ειδικές ερωτήσεις εγγύησης και σοβαρά συμβάντα θα πρέπει να απευθύνονται στην Bone Foam, Inc. στο Corcoran, Minnesota: 763-559-1830 και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο ο χρήστης είναι εγκατεστημένος.

Προσοχή, προειδοποιήσεις και προφυλάξεις: Για την πρόληψη τραυματισμών, όλα τα μέρη του Troop Elevation Pillow (TEP) θα πρέπει να τοποθετούνται με ασφάλεια στο νοσοκομειακό κρεβάτι που χρησιμοποιείται. Ο χρήστης πρέπει να τοποθετήσει το προ-σηματισμένο προστατευτικό κάλυμμα ή το αδιαπέραστο χειρουργικό κάλυμμα πάνω στο TEP. Μην τυλίγετε ποτέ το TEP σε πλαστικό κατά τη διάρκεια της χρήσης σε ασθενή. Διακόψτε τη χρήση εάν υπάρχουν ενδείξεις αλλοίωσης του υλικού.



Bone Foam, Inc.
20175 County Road 50, Corcoran, MN
55340 USA
Phone: 763-559-1830 Fax: 763-559-1822
www.troopelevationpillow.com
www.bonefoam.com



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-Langenhagen
φαξ: + 49-511-3908 9539
τηλέφωνο: + 49-511-3908 9530

Ιστοσελίδα: www.troopelevationpillow.com

Κατασκευασμένο στις ΗΠΑ



"Δεν κατασκευάστηκε από φυσικό καουτσούκ (λάτεξ)"

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις ετικέτες:

Σύμβολο	Αριθ. Αναφ. Συμβόλου	Τίτλος Συμβόλου	Περιγραφή Συμβόλου
	5.1.1	Κατασκευαστής	Δηλώνει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, σύμφωνα με τον MDR 2017/745, όπως ορίζεται στις οδηγίες της ΕΕ.
	5.1.2	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα	Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
	5.1.3	Ημερομηνία κατασκευής	Υποδεικνύει την ημερομηνία κατασκευής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
	5.1.5	Κωδικός παρτίδας	Υποδεικνύει τον κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της παρτίδας.
	5.1.6	Αριθμός καταλόγου	Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
	5.2.7	Μη αποστειρωμένο	Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία αποστείρωσης.
	5.3.2	Διατηρήστε μακριά από το φως του ήλιου	Πρόκειται για μια ιατρική συσκευή που χρειάζεται προστασία από πηγές φωτός.
	5.3.7	Όριο θερμοκρασίας	Υποδεικνύει τα όρια της θερμοκρασίας στα οποία μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια η συσκευή.
	5.3.8	Περιορισμός στην υγρασία	Υποδεικνύει το μέγεθος της υγρασίας στην οποία μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια η συσκευή.
	5.4.3	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης ή Συμβουλευτείτε τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης	Υποδεικνύει την ανάγκη κάθε χρήστη να συμβουλευτεί τις οδηγίες χρήσης.
	5.7.7	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	Υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν.